

1. Mål under busten

Mål omkredsen under busten (i det markerede eksempel nedenfor 79 cm). Sørg for, at målebåndet er vandret og let strammet.

2. Mål over busten

Metode 1: For erfarne afprøvere. Skøn skål-størrelse ved at kikke på brystet. Hvis størrelsen ikke passer ved afprøvning - gå op eller ned i størrelse eller afprøv en anden model for at finde frem til den korrekte.

Metode 2: For uerfarne afprøvere. Mål halv omkreds fra midten af brystbenet (midt mellem brysterne), over hele brystet og til midt på rygsøjlen. Fordobbel derefter summen for at få skålstørrelse (i det markerede eksempel 47 cm x 2 = 94 cm = B-Skål).

Find nu størrelsen som matcher mål under busten og over busten i feltet i diagrammet herunder i forhold til skål-størrelse.

Mål under buste	BH-størrelse under busten	AA-skål	A-skål	B-skål	C-skål	D-skål	E-skål	F-skål	
68-72	70	80-82	82-84	84-86	86-88	88-90			Over busten
73-77	75	85-87	87-89	89-91	91-93	93-95	95-97	97-99	
78-82	80	90-92	92-94	94-96	96-98	98-100	100-102	102-104	
83-87	85	95-97	97-99	99-101	101-103	103-105	105-107	107-109	
88-92	90		102-104	104-106	106-108	108-110	110-112	112-114	
93-97	95		107-109	109-111	111-113	113-115	115-117	117-119	
98-102	100		112-114	114-116	116-118	118-120	120-122	122-124	
103-107	105		117-119	119-121	121-123	123-125	125-127	127-129	
108-112	110		122-124	124-126	126-128	128-130	130-132	132-134	
113-117	115		127-129	129-131	131-133	133-135	135-137	137-139	
118-122	120			134-136	136-138	138-140	140-142	142-144	

3. Find brystprotese størrelse

For at anvende dette diagram:

1. Find skål-størrelse til venstre i diagrammet.
2. Før fingeren til korrekt BH-størrelse under busten.
3. Før finger ned i diagrammet til den brystprotese du vælger, for at finde den størrelse du bør begynde afprøvningen med (i det markerede eksempel str. 5/M).

BH Størrelse	AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-	-	-	
	A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-	-
	D	-	-	-	-	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-	-	-
	E	-	-	-	-	-	-	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	-
	G	-	-	-	-	-	-	-	-	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120

STØRRELSER	Silikonproteser	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	First Form	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	-	-	-	-
	First Form Fiberfill	-	S	S	S	M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	-	-	-	-
	First Filler	-	S	S	S	M	M	M	L	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	-	-	-	-

Husk at dette diagram skal anvendes som en guide. Patienten/kunden kan have behov for en mindre eller større størrelse end det der angives i diagrammet.