


39310 DRAGT

Vejledning til måltagning

elements
body

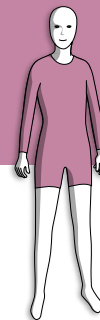

DRAGT uden ÆRMER MED BEN

Orange & firkant = længde

Blå & ring = omkreds


Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målbåndet skal ligge mod huden. Alle mål skal tages direkte mod huden og uden at trække i målbåndet. Alle mål skal tages når patienten er liggende, er afslappet og har normal vejrtrækning. Vi anbefaler at man markerer på patienten for korrekt måltagning.

U	Omkreds maven i højde med navlen
C	Omkreds brystkassen i linje med axilla
N	Rundt halsen - fra nedre del af luftrøret (fossa jugularis sternalis) og rundt halsens base
NS	Halsbredde - Ønske om en breddere halsåbning, mål fra halsens base
ND	ND Halsdybde - Ønske om en halsåbning som går længere ned end luftrøret (for)
BD	Nedringet i nakken – Ønske om en dybere udringning i nakken (bag)
S	Fra halsens base til acromion
SU	Fra nedre del af halsrøret til navlen- fra samme punkt som ved mål "N"
AS	Omkreds i højde med ASIS
L/R9	Omkreds lår ved skridtet og horisontalt gluteal-fold, i en vinkel på 90o
L/R 10	Omkreds midt på låret
L/R 11	Omkreds mid-patella
L/R 12	Omkreds øvre del af læggen ved tuberositas tibia (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R 13	Omkreds læggen bredeste sted (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R 14	Omkreds øvre kant af mediale malleol (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R 15	Fra skridtet til mid-patella på indersiden af benet
L/R 16	Indersiden af benet fra mid-patella til øvre kant af medial malleol (kun til lange ben og ¾ ben)
L/R Instep	Omkreds midt over fodryggen (kun for lange ben)
WW	Talje til talje i højde med navlen. Ved anvendelse af ble tages målet på siden af bleen.
SCV	Fra syvende halshvirvel til axilla (placer en blyant eller en lineal under begge arme så længden ikke bliver for kort)

39310 DRAGT

Vejledning til måltagning

elements
body

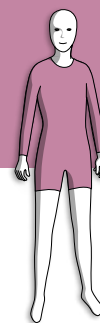

DRAGT uden ÆRMER MED BEN

Specielt til korte ben og 3/4 ben:

CER/CEL Længden fra grenen, på indersiden af benet, til der hvor dragten slutter

Specielt for kvinder (tag mål med bh på, og med patienten siddende):

B Omkreds byst i linje med brystvorten

UB Omkreds under bysten

AUB Fra axilla til under bysten (UB)

Specielt for gastro (kun for Body):

GU Mål fra navlen op til hullet

GD Mål fra navlen ned til hullet

GR Mål fra navlen til hullet på højre side

GL Mål fra navlen til hullet på venstre side