

CAMP[®]



CoverKIT[™] 2.0

Et nyt smart polstrings alternativ til Allard AFO

Kan anvendes til ToeOFF[®] 2.0 og BlueROCKER 2.0[®]

I spurgte - Vi lyttede !

En del brugere vil gerne have en mere jævn ydre, andre et jævnt tryk, og nogle ønsker sig et mere usynligt produkt. **CoverKIT™ 2.0 er løsningen !**

CoverKIT™ 2.0 er en smart løsning som giver en lav profil og samtidigt holder både ortosen og polstingen på plads uden bånd !



Træk hele strømpen på benet op til knæet.



Grib fast i den ydre del ved den blå søm og træk dette lag op.




Hvis det behøves, skal de 2 vertikale neoprenstave monteres i ortosen nu. Sæt ortosen i sko, placer foden og pres derefter ortosen mod strømpen. Tag fat i den blå søm og træk strømpen ned over ortosen. For ekstra sikkerhed kan ortosens bånd også påsættes.



- Smidig og jævn udseende !
- Enkel at tage på og af - træk den på som en benvarmere.
- Giver et smidig ydre som går hele vejen ned til afslutningen af ortosen hvilket hjælper med til at bukserne glider og ikke sidder fast.
- Indersiden er et luftigt non-friction materiale som sammen med ydersiden giver en god låseanordning af ortosen.
- Indersiden er som en SoftKIT™ der beskytter huden og holder ortosen på plads.
- CoverKIT™ leveres med to vertikale neoprenstave som kan sættes på ortosens inderside for at skabe en trykfri kanal og derved undgår tryk mod skinnebenet.
- Ortosens almindelige bånd kan anvendes sammen med CoverKIT™.

Art.nr.	Størrelse	Omkreds læg
28765 0010	X-Small	31 - 34 cm
28765 0011	Small	34 - 37 cm
28765 0012	Medium	37 - 41 cm
28765 0013	Large	41 - 46 cm
28765 0014	X-Large	46 - 51 cm

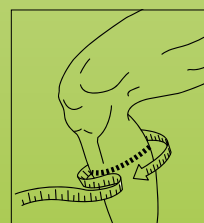

For mere information om Allard AFO besøg allardafo.com

Patent Pending