


Bruksanvisning

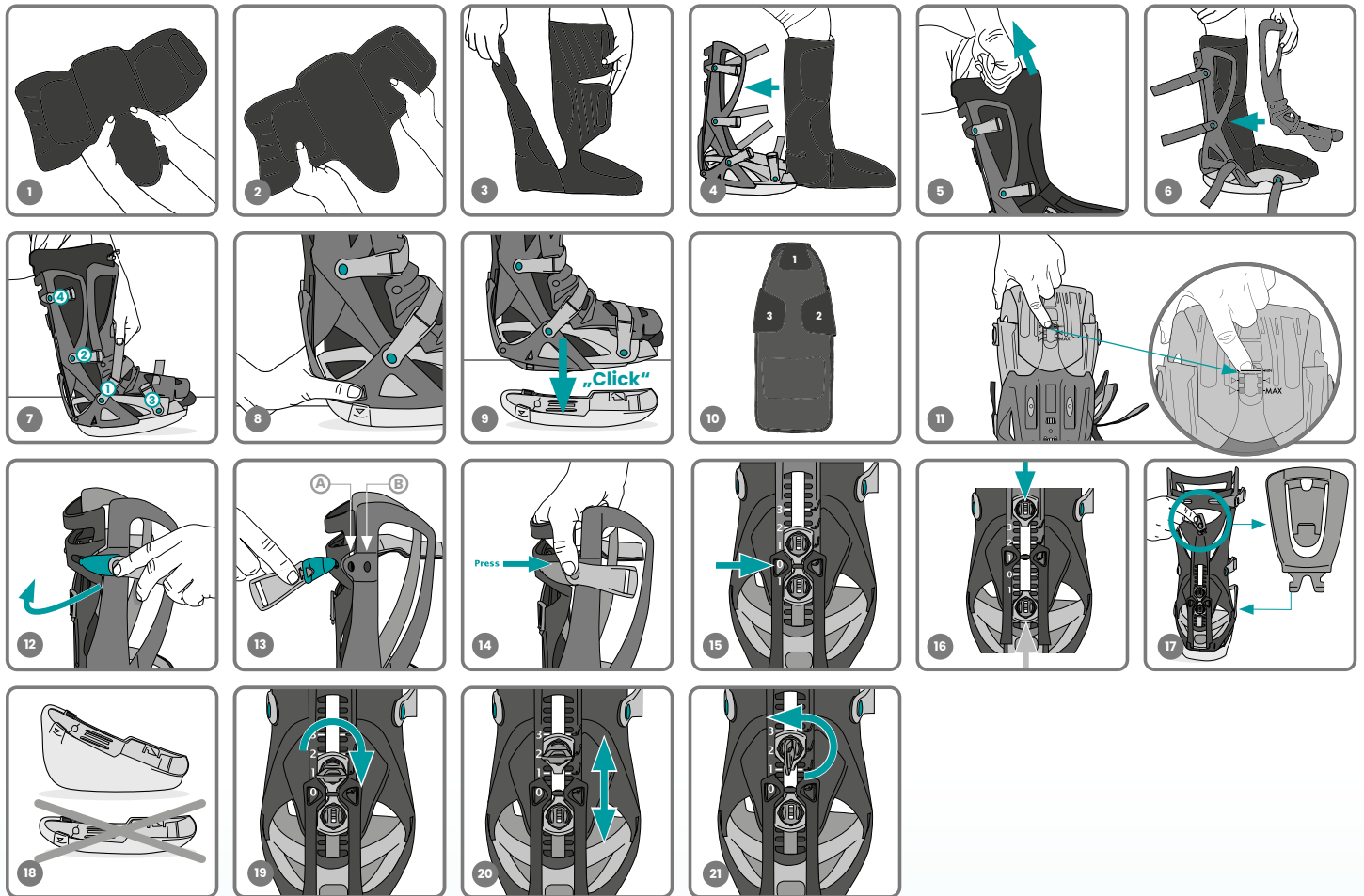

Læs brugsanvisningen og sikkerhedsrådene, før du bruger VACOPed. Du kan finde læsbare brugsanvisninger på vores OPEd-hjemmeside.

Formål: Underbens- og fodartose til immobilisering af leddene i definerede, justerbare positioner og til mobilisering i definerede bevægelsesområder.

Sikkerhedsoplysninger

- ⚠ Produktet er kun beregnet til brug på en enkelt patient.
- ⚠ VACOPed er ikke designet til dynamiske belastninger såsom hop og hurtig gang. Hvis du falder med VACOPed'en på, skal du straks tjekke din enhed for skader. Hvis VACOPed'en er beskadiget, kan det påvirke din sikkerhed.
- ⚠ Bær aldrig produktet over åbne sår, og brug det kun efter forudgående medicinsk instruktion.
- ⚠ Patienten må kun ændre enhedens positioner efter samråd med den læge, der er ansvarlig for deres behandling.
- ⚠ Hvis der opstår voldsomme smerter eller følelsesløshed, eller hvis du oplever usædvanlige reaktioner eller en ubehagelig følelse, mens du bruger enheden, skal du straks kontakte din læge eller ortopædtekniker.
- ⚠ Denne medicinske enhed er designet til de angivne indikationer og kan blive beskadiget ved forkert brug, f.eks. under sportsaktiviteter, uforudsete uheld (f.eks. fald) eller kontakt med væsker, der er uforenelige med plast.
- ⚠ Tal med din læge, hvis du bruger det i kombination med et andet medicinsk produkt.
- ⚠ Der må kun anvendes reservedele og/eller udskiftningsdele, der er godkendt af OPEd GmbH.
- ⚠ Vær opmærksom på gældende færdselslov i dit land.
- ⚠ Ikke lavet af naturgummilatex.
- ⚠ Tjek, at sålen sidder sikkert – ellers er der risiko for at snuble!
Sål: Når tådelen er helt udstrakt, kan gangen blive ændret eller begrænset.
- ⚠ Indlæggets fyld kan forskydes. Derfor anbefales det at løse fyldet hver anden til tredje dag og derefter glatte det ud.
- ⚠ Dette produkt er beregnet til ikke at blive brugt i mere end 4 måneder.
- ⚠ Når du har ortosen på, skal du sørge for, at skoene er høje nok på den modsatte side, eller at sålen er hævet for at kompensere for højdeforskellen.

Sådan tager du ortosen på (instruktionsvideo kan findes på app.oped.de)

Sådan tager du undersokken på:

Åbn den øverste del af sokken på vid gab for nemt at skubbe den på. Træk derefter sokken opad.

Påsætning af indlægget:

Åbn stropperne, og fjern indlægget fra skallen. Åbn indlægget. Før påsætning skal du løse indlægget omkring sålen og ankelområderne og derefter glatte det ud for at få en jævn fordeling (se billede 1 og 2). Placer foden helt bagerst på indlægget, og fastgør velcro-stropperne (billede 3). Velcro-stropperne klæber til hele indlæggets ydre overflade.

Påsætning af den hårde skal:

Placer foden med indlægget i skallen (billede 4 og 5). Sørg for, at foden er placeret helt bagerst på skallen. Sæt derefter frontstykket på skallen (billede 6), og spænd stropperne godt fast; justér dem ud fra komfort og smertniveau (billede 7).

Indlægsbolstringen har brug for en kort periode til at tilpasse sig anatomien helt. Stram om nødvendigt stropperne.

Vinkeljustering

Leveringstilstand: Neutral nulstilling (0° = 0°) (Figur 15)

Der er to mulige anvendelser:

1. mulighed: Fikseret ankel (fast indstilling): De øvre og nedre Begrænser-skruer er ikke adskilte (Figur 15).

2. mulighed: Begrænset bevægelsesfrihed (ROM-indstilling): Til brug, så snart bevægelse er tilladt (Figur 16). Afstanden mellem Begrænser-skruerne bestemmer omfanget af ankelledets bevægelsesområde (ROM). Bevægelsesområdet kan ændres i intervaller på 5° fra 15° af dorsal ekstension (løft af tæerne) til 30° af plantar fleksion (equinusstilling = tæerne hælder).

Bemærk: Det er lægen/fysioterapeuten, der afgør, om der skal anvendes et bevægelsesområde (ROM).

Scale on the product	Corresponds in degrees	Ranges of movement (ROM)
3	+30°	Plantar flexion, starting from the neutral - zero position
•	+25°	
2	+20°	
•	+15°	
1	+10°	Neutral - zero position
•	+5°	
0	0°	
•	-5°	
1	-10°	Dorsal extension, starting from the neutral - zero position
•	-15°	

Ændring af vinkelindstillingen

Øvre Begrænser for fleksion i fodsålen (equinusstilling = tæerne hælder)
Nedre Begrænser for dorsal ekstension (løft af tæerne)

Fjern nøglen fra holderen (Figur 17), og sæt den ind i skruen. Drej nøglen vandret (Figur 19). Løft Begrænseren, og skub den til den ønskede position (Figur 20). Drej nøglen lodret (Figur 21). Gentag om nødvendigt ovenstående trin med den anden Begrænser.

Bemærkning om behandling af akillesenseskader i equinusstilling: Med en fast vinkelindstilling mellem +15° og +30° skal du bruge kilesålen (Figur 16). Hvis kilesålen ikke er inkluderet i pakken, skal den bestilles separat fra OPEd.

Montering og udskiftning af sål

Fjernelse af sålen

Tryk på begge oplåsningsknapper samtidigt (figur 8)

Montering af sål

Placer VACOCast'en lige og centreret på sålen, før du skubber den mod sålen (hørbare klik) (Figur 9). Tjek, at sålen sidder godt fast.

Justering af sålens længde

Fjern sålen, og tryk på oplåsningsknappen. Flyt tåstykket til den ønskede position (Figur 11).

Justering af læggeomkredsen

Skub spændet på begge sider ud af den nederste skal (Figur 12). Skub spændet til den ønskede position. Position A = stor læggeomkreds, Position B = lille læggeomkreds (Figur 13). Skub spændet ind i det nødvendige hul (Figur 14).

Patientoplysninger

Trykpunkter/problemøsning

Ælt den indvendige sko i sål- og ankelområdet, så fyldet løsner sig, og derefter glattes ud for at sikre en jævn fordeling. Hvis velcrolukningerne på undersiden af inderdelen har løsnet sig, og begge dele skal samles igen: (Fig. 9)

- Luk først den bagerste midterste velcrolukning (se 1).
- Luk sidevelcrolukningerne (se 2 og 3).

Sørg for, at velcrolukningerne ikke er skæve, og at de er placeret som vist på billedet.

Brusebad/vask

Vi anbefaler at bruge en brusebeskytter, når du bader. Hvis ortosen eller dens overstyrke bliver våd, skal de tørres.

Søvn

Før du går i seng, skal du placere et håndklæde under enheden, så sengetøjet ikke bliver beskadiget.

Produktegenskaber

Størrelser

Produktet kan bæres på venstre eller højre side.

Anbefaling Ved størrelsesoverlap mellem Small/Medium- og Medium/Large-versionerne skal du levere den mindre VACOPed-størrelse, hvis det er muligt.

	Small	Medium	Large
EUR	35 - 40	40 - 45	45 - 50
UK	2 ½ - 6 ½	6 ½ - 10 ½	10 ½ - 14
US (M)	3 ½ - 7 ½	7 ½ - 11 ½	11 ½ - 15
US (F)	4 ½ - 8 ½	8 ½ - 12 ½	12 ½ - 16

Indikationer

- Frakturer i ankelledet
- Metatarsale frakturer
- Akillesenerupturer
- Frakturer i hælbenet
- Alvorlige forstuvninger
- Protese
- Artrodeser

Kontraindikationer


Ingen kendte

Information vedrørende pleje/rengøring/desinfektion/sterilisering

Du modtager dette medicinske produkt i en hygiejnisk perfekt stand.

Rengøringsvejledning til patienter:

- Nedre skal: Opvaskemaskine ved 60 °C
- Stropper: Vaskemaskine ved 40 °C
- Indvendig sko: Vaskemaskine, 40 °C. Vaskes separat med et mildt vaskemiddel og i en lukket vaskepose.
- Understrømpe: Vaskemaskine, 30 °C.
- Desinfektion: Tørres af med plastkompatibelt desinfektionsmiddel.
- Sterilisering: Dette medicinske produkt er ikke egnet til sterilisering.

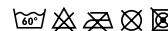

Tilbehør

Hvis tilbehøret ikke medfølger, kan det bestilles hos OPEd GmbH.

- Kilesål til behandling af akillesenseskader
- Positioneringsstøtte/anti-rotationsstang
- Forsegling
- Dorsum-pude
- Klik-disk

Tekniske data/parametre

Anvendte materialer:

Hårde skaller: PP/POM (polypropylen/polyoxymethylen)

Stropper: PP (polypropylen)

Ydersål: EVA (ethylenvinylacetat)

Forstykke: PP (polypropylen)

Indlæg: Polyester (PES), polyamid (PA), polyurethan (PU), ethylenvinylacetat (EVA), EPS, Fyld: EPS (ekspanderet polystyren)

Alle dele og komponenter er latexfrie.

Bemærk: Ikke lavet af naturgummilatex.

Transportforhold/opbevaringsforhold/bortskaffelse

Opbevaring: Opbevares på et tørt og hygiejnisk sted og beskyttes mod direkte sollys.



Tyskland: Den medicinske anordning er et udlejningsprodukt og skal returneres til OPEd.

Schweiz: Det medicinske udstyr kan returneres gratis til OPEd.

Andre lande: Bortskaf den medicinske enhed som restaffald eller husholdningsaffald.



Garanti

Garantien er i overensstemmelse med lovmæssige bestemmelser. OPEd GmbH's forretningsbetingelser gælder også, hvor det er tilladt.

I tilfælde af reklamationer vedrørende produktet, såsom skader eller problemer med pasformen, bedes du kontakte producenten direkte. Kun alvorlige hændelser, der kan føre til en væsentlig forringelse af helbred eller død, bør rapporteres til producenten og de ansvarlige myndigheder i medlemsstaten. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Dit OPEd-team