

CAMP®

**Semi-rigid
Hyperextensionsortose**





En funktionel knæortose til hyperekstension i knæleddet.



Effektiv og let håndterbar knæortose til hyperekstension

Tyndt, let og åndbart materiale, som er behageligt for brugeren



- Den unikke forstærkning gør, at ortosen altid holder sig åben i overkanten. Det gør det lettere at føre ortosen over foden og op på benet selv ved nedsat funktion.
- Smart påtrækningslomme i overkanten i forhold til enkelt påtagning. Justeres så patellaåbningen er korrekt placeret over knæet.

Blød inderside med lav friktion og uden synlige søm som kan irritere



- Skaber et "beskyttelseslag" mellem ortosen og huden
- Modvirker hudirritation
- Hjælper ortosen til at glide let over foden og op på benet.

Tag ortosen på med en hånd

Den unikke T-bøjle gør det lettere at:

- At tage ortosen på siddende
- At tage ortosen på ved nedsat håndfunktion.



Hvordan skal T-bøjlen anvendes?

- T-bøjlen monteres under den grå markering på lårets bagside
- Med alle bånd åbne trækkes ortosen med bagsiden fremad og over foden.
- Når ortosen trækkes op over foden vrides ortosen korrekt. Dette moment gør det lettere på grund af det bløde materiale på ortosens inderside. Ortosen trækkes op på benet til patellaåbningen er korrekt placeret på knæet.



SEMI-RIGID Hyperextensionsortose

T-BØJLE



FRA SIDEN



BAGFRA



CROSS™ er lavet til mild til moderat hyperextension i knæledet som følge af neuromuskulære sygdomme eller andre skader. Ortosen kan anvendes sammen med Allard AFO's, når hyperextension i knæledet forekommer i kombination med en dropfod.

Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Omkreds 15cm under midt-patella	Omkreds midt-patella	Omkreds 15cm over midt-patella
28715 0011	Knæortose	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715 0012	Knæortose	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715 0013	Knæortose	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715 0014	Knæortose	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716 0000	T-Bøjle	One Size			