

CAMP[®]

Funktionelle knæortoser til artrose

i samarbejde med

 **VQ OrthoCare**[®]



Support for Better Life!


Vores sortiment til Osteoartrit-ortoser

Camp Scandinavia tilbyder i samarbejde med VQ OrthoCare en række unikke knæortoser til behandling af artrose. Vores brede sortiment giver et godt udvalg til skræddersyede løsninger. Produkterne er af høj kvalitet, hvad angår materiale og funktion og har egenskaber, der letter både tilpasning og afprøvning.



Produktguide

Valget af knæortose ved behandling af artrose er primært baseret på graden af skaden og patientens aktivitetsniveau. Andre faktorer, der kan påvirke valget, er patientens erfaring, lægens anbefaling eller andre ledsykdomme.

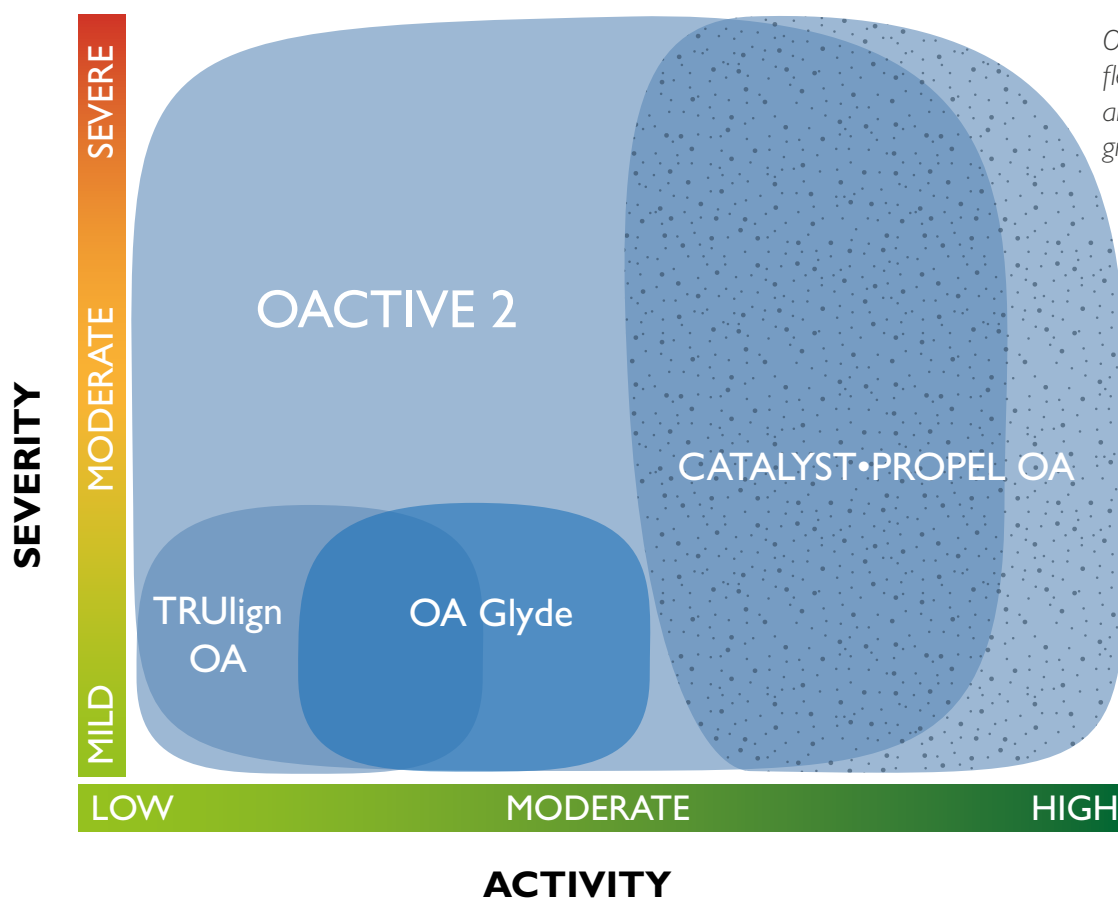


OActive®2 passer de fleste patienter uanset aktivitetsniveau eller graden af skaden

Q-hinge teknologi


Q-Leddet ændrer ortosens samlede valgus/varus-vinkel i forhold til optimal korrektion. Dette giver mulighed for at finjustere korrektionskræfterne under tilpasningsprocessen baseret på patientens patologi og tolerance for en klinisk effekt, der opfylder kravene.




OACTIVE®2 FÖR MEDIAL OA

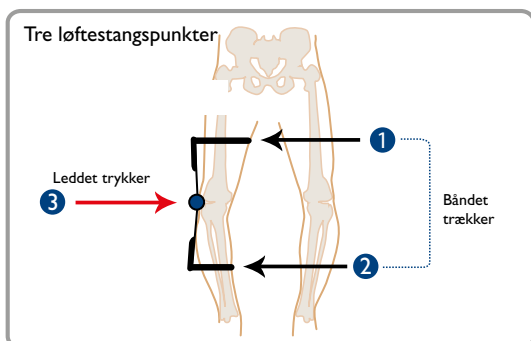


OACTIVE®2 FÖR LATERAL OA

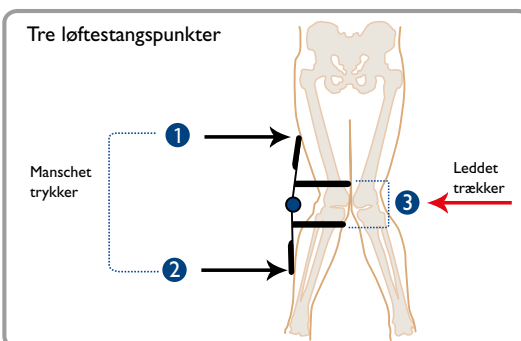


CATALYST PROPEL FÖR MEDIAL OA

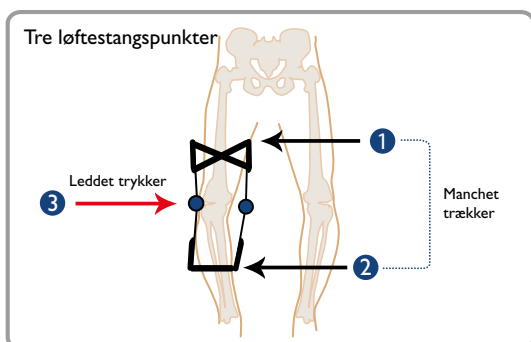


CATALYST PROPEL FÖR LATERAL OA

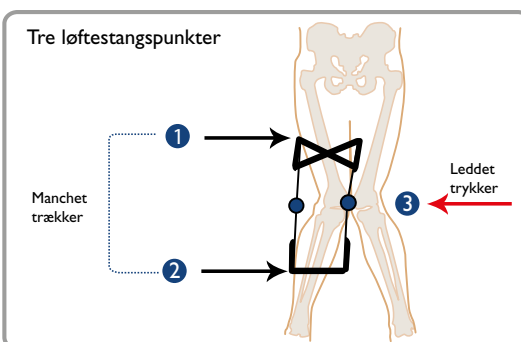

TRULIGN™ OA FÖR MEDIAL OA

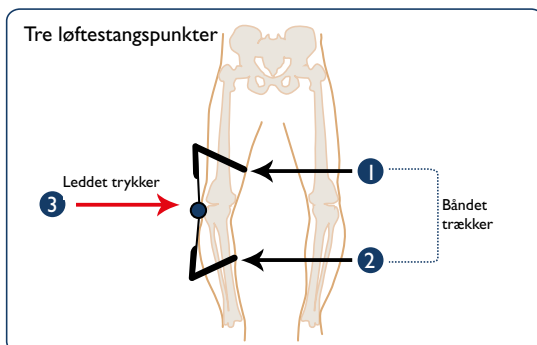

TRULIGN™ OA FÖR LATERAL OA

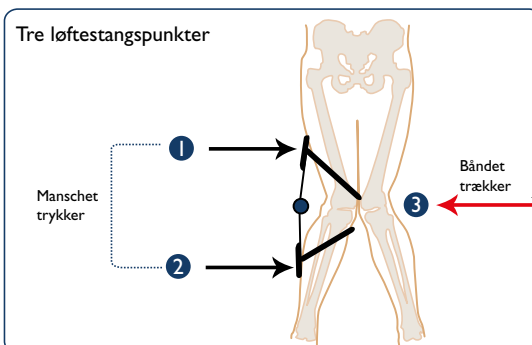

OActive[®] 2

Unilateral knæortose til behandling af enkelsidigt knæartrose. Letvægt, smidig og enkel konstruktion med en lav profil, der gør den mindre synlig under tøjet. Ortosen har smarte innovative spænder, der gør det let at tage ortosen af og på. Fremstillet i aluminium.

Det unikke Q-leddet kan justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. OActive[®] 2 kan også justeres i forhold til at begrænse bevægelsesområdet ved ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også justeres til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret. Ortosen leveres med et ark med forskellige stop til fleksion og ekstension.

OActive[®] 2 fås i One Size, venstre eller højre.

Suspension sleeve

Med hver OActive[®]2 følger et Suspension sleeve, som kan anvendes på to måder:

1. Efter afprøvning af ortosen kan sleeveen monteres over den nederste del af ortosen for at forhindre migration.
2. Efter afprøvning kan sleeveen placeres mellem benet og ortosen. Fjern polstringen på den nederste del af ortosen og tryk derefter ortosens velcrolukning mod sleeveen.

Alternativ 2 er den optimale løsning for at forhindre at ortosen glider ned.



Størrelsestabel - OActive [®] 2			
Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
OActive [®] 2	Grå	One Size	Venstre
OActive [®] 2	Grå	One Size	Højre
Suspension sleeve	Grå	61 cm	-
Suspension sleeve	Grå	81 cm	-
Ekstra bånd sæt (uden spænde)	Grå	One Size	Venstre
Ekstra bånd sæt (uden spænde)	Grå	One Size	Højre
Ekstra polstring	Grå	One Size	Venstre
Ekstra polstring	Grå	One Size	Højre



Catalyst Propel™ OA

Denne firepunkts knæortose er beregnet til behandling af mild til svær enkelt-sided knæartrose i kombination med knæinstabilitet eller efter skade for at reducere belastningen på leddet. Ortosen har den unikke Active Thigh Cuff™ (ATC) løsnings på forsiden af låret. Dette er en fleksibel og stærk dobbelt lårmanchet, der giver mulighed for den ultimative montering. Giver beskyttelse og komfort ved at bevæge sig med musklerne under hele bevægelsen. Stærk, men lavprofil aluminiumsramme af højeste kvalitet giver enestående beskyttelse.

Ortosens Q-led kan justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutral position, med knæet bøjet i 90°, og drej 1/8 af en omdrejning ad gangen for at justere aflastningen. Ortosen leveres med et ark med forskellige stop til fleksion og ekstension. Catalyst Propel™ OA kan også indstilles til at begrænse bevægelsesområdet ved ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.



Dobbelt Q-led

Standardstørrelser, som giver unik justering af varus/valgus vinkel.

Størrelsestabel - Catalyst Propel™ OA			
Størrelse	15cm over midt-patella i cm	Midt-patella i cm	15 cm under midt-patella i cm
S	37 - 43	29 - 33	29 - 33
M	43 - 49	33 - 38	33 - 37
L	49 - 57	38 - 43	37 - 42
XL	57 - 65	43 - 48	42 - 47
XXL	65 - 76	48 - 56	47 - 56

Dimensionerne angivet ovenfor er cirkulære.



TRUalign™ OA

TRUalign OA™ er en unilateral knæortose til behandling af mild til moderat enkelsidig knæartrose. Det er et enkelt-sided OActive™-led, designet til en brugervenlig "wrap around"-ortose. Trykknapper bidrager til let af- og påtagning.

Ortosen er anatomisk udformet og materialet har en stor strækbarhed, der giver god pasform og kompression. Materialet er luftigt og behageligt. Q-leddets teknologien giver brugeren god aflastning i henhold til 3-punktsprincippet for at mindske tryk og smerter i knæet ved knæartrose.

Anvendelsesområde: Enkelsidig medial eller lateral, mild til moderat knæartrose.



Størrelsestabel - TRUalign™ OA		
Størrelse	15cm over midt-patella i cm	15 cm under midt-patella i cm
S/M	36-47 cm	28-36 cm
M/L	47-65 cm	36-48 cm
L/XL	65-81 cm	48-64 cm

Dimensionerne angivet ovenfor er cirkulære.



Glyde OA™

Glyde OA er til den aktive livsstil og er let at tage på med "wrap around" lukning.

Spiralbåndet giver en dynamisk aflastning i forhold til komfort og smertelindring. Det korrigerende led er dækket og ortosen lukkes nemt med trykknop.

Anvendelsesområde: Enkelttidig medial eller lateral, mild til moderat knæartrose.



Størrelsestabel - OA Glyde™		
Størrelse	15cm over midt-patella i cm	15 cm under midt-patella i cm
Small	36 - 43	29 - 34
Medium	43 - 51	34 - 39
Large	51 - 61	39 - 46
X-Large	61 - 71	46 - 52
XX-Large	71 - 81	52 - 60

Dimensionerne angivet ovenfor er cirkulære.



Størrelsetabel

Art.nr. Venstre	Art.nr. Højre	Model	Størrelse	Farve
550001000	550002000	OActive 2 (max 135 kg)	En størrelse	Lysegrå
550011011	550012011	Catalyst·Propel OA, ATC	Small	Mørkegrå
550011012	550012012	Catalyst·Propel OA, ATC	Medium	Mørkegrå
550011013	550012013	Catalyst·Propel OA, ATC	Large	Mørkegrå
550011014	550012014	Catalyst·Propel OA, ATC	X-Large	Mørkegrå
550011015	550012015	Catalyst·Propel OA, ATC	XX-Large	Mørkegrå
550181011	550181011	TruLIGN OA	Small/Medium	Sort
550181012	550182012	TruLIGN OA	Medium/Large	Sort
550181013	550182013	TruLIGN OA	Large/X-Large	Sort
550241011	550242011	OA Glyde, medial	Small	Sort
550241012	550242012	OA Glyde, medial	Medium	Sort
550241013	550242013	OA Glyde, medial	Large	Sort
550241014	550242014	OA Glyde, medial	X-Large	Sort
550241015	550242015	OA Glyde, medial	XX-Large	Sort
550251011	550252011	OA Glyde, lateral	Small	Sort
550251012	550252012	OA Glyde, lateral	Medium	Sort
550251013	550252013	OA Glyde, lateral	Large	Sort
550251014	550252014	OA Glyde, lateral	X-Large	Sort
550251015	550252015	OA Glyde, lateral	XX-Large	Sort
550121000	550122000	OActive®2 Ekstra båndsat (uden spænde)		
550131000	550132000	OActive®2 Ekstra polstring		
550140061		Suspension Wrap	6 l cm	
550140081		Suspension Wrap	8 l cm	