

# Rengøring og vedligeholdelse af skinner fremstillet i X-LITE® og andre typer Lavtemperaturplast.

I tider med ekstra fokus på infektionsforebyggelse og rekommandationer om hyppig håndvask, må man samtidigt være ekstra påpasselig med at rengøre sine skinner. Vi anbefaler, at du vasker din skinne en gang om dagen for at holde den ren og hygiejnisk.




Fyld en balje med lunket vand og et par dråber mild håndsæbe eller opvaskemiddel. Fastgør alle velcrobånd ved at lukke dem.



Brug hænderne til at lave skum og lig efterfølgende skinnen i vandet.



Gnid skinnen forsigtigt i ½-1 minut. Anvend eventuelt en blød børste for at komme ind i alle huller og perforeringer, som findes i materialet.

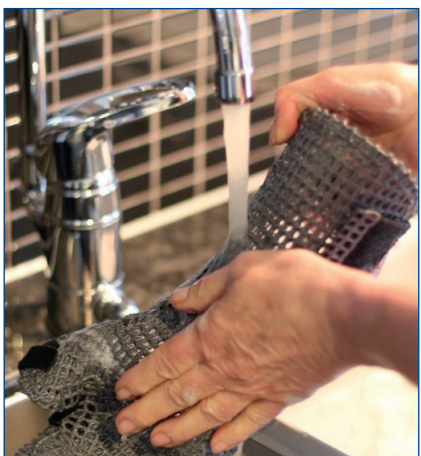

Skyl efterfølgende skinnen i koldt vand.



Dup skinnen tør med et rent håndklæde. Tør ikke skinnen med en hårtørre eller lignende varmekilde, da dette kan blødgøre materialet og ændre formen på skinnen. Dog kan en hårtørre på kold luft anvendes på velcrostropperne eller hvis skinnen er fremstillet af X-LITE® Plus, da tekstilmaterialet kan tage lidt længere tid om at tørre op.

*Du kan anvende gængse alkoholbaserede desinfektionsmidler indimellem den grundige vask af din skinne. Visse desinfektionsmidler kan indeholde andre stoffer, så vi anbefaler, at du tester et lille område først. Hvis du anvender skinnen udenfor hjemmet eller på jobbet, kan du med fordel beskytte den med en handske eller lignende. Hvis du er forsynet med en cirkulær ikke-aftagelig X-LITE® gips, anbefaler vi, at du beskytter den på samme måde. Du kan med fordel aftørre den dagligt med en blød klud fugtet i sæbevand.*