



CAMP®

**3D-LITE™**  
Cut-4-Custom  
LSO & TLSO

Fremstil et  
**INDIVIDUELT  
TILPASSET  
RYGKORSET**  
let og hurtigt!



1  
Opvarm i ovn ved 70°-80°C eller opvarm med varmepistol i ca. 3 minutter.



2  
Modeller rygdelen på patienten.



3  
Fikser med et elastisk korset eller elastikbind.



4  
Anvend de forud fastgjorte stropper til at lukke den opvarmede forreste del.

# Skræddersyet LSO eller TLSO

## 3D-LITE™

### CUT-4-CUSTOM

Når du har brug for en rigid individuel tilpasset LSO eller TLSO NU!

- C4C-panelerne er fremstillet i 3D-LITE™ lavtemperatur Termoplastisk materiale.
- For- og bagside har stropper, der er fastgjort på forhånd. Begge sektioner er klar til opvarmning og individuel tilpasning til patienten.
- 2 højder for at imødekomme ordination og patientens anatomi.
- Ryg og front plade sælges separat og kan kombineres.

#### Indikationer

Kompressionsfraktur. Post-operativ anvendelse. Stabilisering af ryggen.





Modeller forreste del på patienten.



Fikser med et elastisk korset eller elastikbind.



Kontroller pasformen.

på mindre end en ½ time!!

**3D-LITE™** er et åbent vævet polyester materiale som imprægneres med en ikke-giftig polymer for at tilbyde en innovativ, letvægts lavtemperatur termoplast.

3D-LITE™ er et IKKE-giftigt materiale og udvikler ingen skadelige stoffer, når det opvarmes, modelleres eller under tørringsprocessen. Materialet kan påføres uden brug af handsker og specielt ventilationsudstyr i gipse rummet. Det er sikkert for alle brugere at arbejde med 3D-LITE™, inklusive gravide, astmatikere og personer der lider af allergi.

#### Klar ved første patientbesøg

- Opvarmes og klar til at forme på patienten på mindre end 10 minutter
- Hærdet og færdigt LSO eller TLSO på ca. 20 minutter
- Kan genopvarmes og tilpasses flere gange
- De påmonterede stropper flyttes let for en yderligere tilpasset pasform

#### Optimal formbarhed

- Strækbart i kun en retning i opvarmet tilstand
- Styrke og stivhed i alle retninger efter hærkning

#### Øget patientkomfort og compliance

- Luftigt og åndbart
- Letvægt
- Ikke-giftigt materiale, ingen rapporter om hudirritation
- Kan bæres i brusebadet





# MÅLTAGNINGSSINSTRUKTIONER

## 3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



### Størrelse

Størrelsen bestemmes af taljemål.  
Tag målet stramt. Mål også højden  
for og bag i henhold til anvisningerne.  
Vælg størrelse fra tabellen.

Beskrivelse	Omkreds i cm		Total højde for i cm	Total højde bag i cm
	min	max		
LSO, XS/S	60	75	19,5	30
LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
LSO, L/XL	95	120	24,5	35
LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO, S/M	70	90	42	42
TLSO, M/L	85	110	48	48
TLSO, L/XL	105	135	48	48
TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO front



LSO bak





TLSO front



TLSO bak

Illustrationerne viser omtrentlig højde for de forskellige modeller LSO eller TLSO.

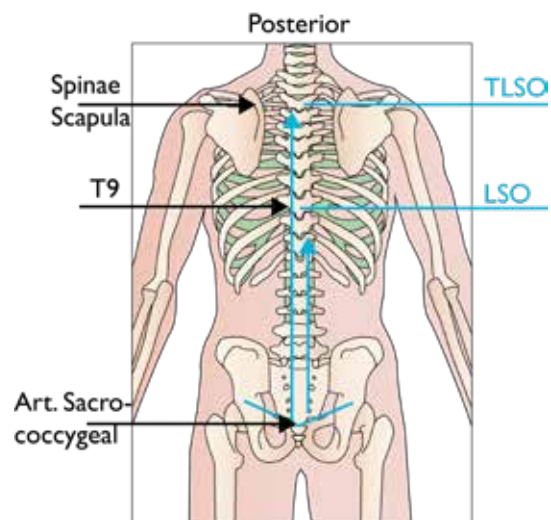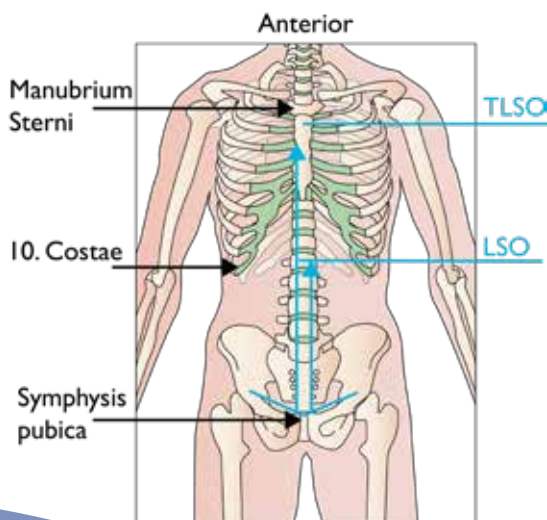

CampScandinavia, DEC\_2020©