



Knæortoser



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

CROSS™ semi-rigid knæortose til hyperekstension

CROSS™ er en semi-rigid knæortose, som anvendes ved overstrækning i knæleddet. CROSS er udviklet specielt til at passe sammen med en ALLARD AFO (Ankel-Fod-Ortose/Dropfodsortose). Der er intet bånd eller spænde, der kommer i konflikt med kompositskinnen. Båndkrydset på bagsiden stabiliserer overstrækningen.

Den unikke konstruktion gør ortosen let at tage på og af med én hånd. Ortosen har en ultrablød inderside uden søm. Den bløde inderside gør at ortosen glider let mod huden og derfor er let at trække op på benet. For at hindre migration har ortosen silikonebånd strategisk placeret på indersiden.

Den unikke forstærkning i overkanten gør, at CROSS™ altid forbliver åben, hvilket er en forudsætning for at kunne tage ortosen på med én hånd. Ta-på hornet hjælper personer med nedsat balance og rækkevidde til at styre ortosen over foden og trække den op på benet.

CROSS™-ortosen har led med indstilling for fleksion og ekstension, som følger med produktet. Bevægelsesinterval i ROM leddet er fleksion: 45, 60, 75, 90 grader og ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Ortosen leveres med leddene indstillet i 10 grader fleksion.

Anvendelsesområde: CROSS™ er lavet i forhold til mild til moderat hyperekstension i knæleddet, som følge af neuromuskulære sygdomme eller andre skader. Ortosen kan anvendes sammen med Allard AFOs, når hyperekstension i knæleddet forekommer i kombination med dropfod.

Øvrigt: CROSS™ kan vaskes i 40 grader. I emballagen er der også en tydelig grafisk instruktion om, hvordan man let tager ortosen på og af.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28715	CROSS™ knæortose	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715	CROSS™ knæortose	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715	CROSS™ knæortose	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715	CROSS™ knæortose	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716	CROSS™ Ta-på-hornet	One Size			
35710	Fleksion/Ekstension stop				

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella er en knæortose, som har direkte fokus på patella problemer. Den hesteskoformede pelotte kan enkelt tages ud og placeres på den side af patella, såfremt der er brug for støtte. Pelotten har elastiske bånd, der hæfter i det bløde velourmateriale omkring knæet. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere ortosen. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde: Patella luxation, patellofemoralt smertesyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, smerter omkring knæleddet.

Øvrigt: Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35704	Sort	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35704	Sort	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35704	Sort	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35704	Sort	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35704	Sort	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Knee Minor

SELECTION® Minor anvendes ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmefunktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Modellen er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Patellaåbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres i forhold til at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt for øget komfort.

Anvendelsesområde: Knæsmerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35700	Sort	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35700	Sort	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35700	Sort	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35700	Sort	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35700	Sort	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35700	Sort	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella



SELECTION® Minor Wrap

SELECTION® Minor anvendes ved mildere smertetilstande i knæet. Minor giver let kompression og har en varmefunktion. De stabiliserende spiralfjedre på siderne giver en let og behagelig støtte. Det åbne design gør ortosen let at tage på og af. Patellaåbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Lukningen på lår og læg kan enkelt efterjusteres for at opnå optimal komfort. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort.

Anvendelsesområde: Knæsmerter ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse.

Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL-rupturer. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Dette produkt findes i to lårvidder, se produktinformationen i tabellen.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35701	Sort	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35701	Sort	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35701	Sort	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Sort	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Sort	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Sort	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Sort	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Sort	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Sort	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Sort	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Sort	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.

SELECTION® Knæ Optima

SELECTION® Optima anvendes ved en række forskellige smertetilstande i knæledet. Ortosens multi-funktioner bevirker, at den er enkel at tilpasse. Optima leveres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led. Hyperekstensjonskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer. Denne model er fremstillet som en strømpe og giver dermed øget kompression og forbedret proprioception. Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning i forhold til optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæledet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede, hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde: Middel hyperekstension i knæledet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæledet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Bevægelsesinterval i ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35702	Sort	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35702	Sort	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35702	Sort	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35702	Sort	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35702	Sort	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35702	Sort	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

SELECTION® Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap anvendes ved en række forskellige smertetilstande i knæleddet. Ortosens multi-funktioner bevirker, at den er enkel at tilpasse. Optima leveres komplet med indstillelige skinner med dobbelte led. Hyperekstensionskryds på bagsiden der enkelt kan monteres og tages af. Ekstra bånd for at mindske at tibia falder forover i forbindelse med ACL-problemer. Ortosen har en anatomisk formet patellaåbning for optimal pasform. Den delte lukning på lår og læg gør det enkelt at efterjustere. Materialet i knæleddet er ekstra smidigt i forhold til øget komfort. Optima har rigide bånd oppe og nede, hvilket giver øget stabilitet.

Anvendelsesområde: Middel hyperekstension i knæleddet, middel/moderat M-L instabilitet, begyndende Artrose, patellafemoralt smertesyndrom, Reumatoid artrit, kollaterale ligamentskader (MCL, LCL) og ACL-skader.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andre aktiviteter hvor knæleddet udsættes for stærk påvirkning og hvor der findes stor risiko for ACL/PCL skader. Vær varsom ved svære problemer med hævelse og/eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Bevægelsesinterval ROM leddet. Fleksion: 45, 60, 75, 90 grader. Ekstension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Dette produkt findes i to lårvidder, se produktinformation i tabellen.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35703	Sort	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35703	Sort	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35703	Sort	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Sort	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Sort	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Sort	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Sort	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Sort	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Sort	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Sort	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Sort	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.

Active X™ Sleeve

Denne påtrækningsmodel er beregnet til at lindre smertetilstanden i knæet. Materialet i ortosen giver en mild kompression og varme. Patella-åbningen er anatomisk formet for optimal pasform. Omkring patella åbningen ligger en blød polstring i forhold til øget patellastabilisering. Ortosen har velcro justering på lårets forside samt på læggens bagside. Active X Sleeve har en spiralskinne på hver side.

Anvendelsesområde: Knæsmerte ved belastning, lette ligamentskader, overanstrengelse, mild knæinstabilitet.

Kontraindikationer: Svære knæskader så som ACL/PCL-rupturer, svære MCL/LCL skader. Vær opmærksom på problem ved hævelse og/ eller dårlig blodcirkulation.

Øvrigt: Ortosens længde er 32 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28056	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Active X™ Sleeve PLUS

Denne påtrækningsmodel er beregnet til at lindre smerten i knæet.

Materialet i ortosen giver en mild kompression og varme. Patella åbningen er anatomisk formet i forhold til optimal pasform. Omkring patella-åbningen ligger der en blød polstring for øget patellastabilisering. Ortosen har velcro justering på låret foran samt bagpå læggen. Active X Sleeve PLUS har to spiralskinner på hver side samt to stabiliserende cirkulære bånd. PLUS er derfor noget mere stabil end Active X Sleeve. I øvrigt har ortoserne samme design og egenskaber.

Anvendelsesområde: Knæsmerte ved belastning, lettere ligamentskader, overanstrengelse, mindre knæinstabilitet

Kontraindikationer: Svære knæskader såsom ACL/PCL rupturr, svære MCL/LCL skader. Vær opmærksom på hævelse og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Ortosens længde er 32 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm

Active X™ Double Axis

En knæortose til forskellige typer knæ smerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har dobbeltledet skinner og er indstillet på 10 graders fleksion. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Cirkulerende bånd med D-ring (et oppe og et nede) som kan løsnes. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Påtrækningsmodellen har en blød polstring rundt om patella i forhold til øget stabilisering.

Anvendelsesområde: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer.ACL/PCL skader. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Længden på ortosen er 32 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28058	Påtrækningsmodel	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Påtrækningsmodel	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Slå-om-model	Sort	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Slå-om-model	Sort	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Slå-om-model	Sort	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Slå-om-model	Sort	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Slå-om-model	Sort	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Slå-om-model	Sort	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella

Active X™ Short

En knæortose til forskellige typer knæ smerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksion/ekstensionstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Cirkulerende bånd med D-ring (et oppe og et nede) som kan løsnes. Leveres med leddet indstillet på 10° fleksion. Sæt med stopperer er inkluderet.

Anvendelsesområde: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediale eller laterale meniskskader.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer.ACL/PCL skader. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Længden på ortosen er 32 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28050	Påtrækningsmodel	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050	Påtrækningsmodel	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051	Slå-om-model	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Slå-om-model	Sort	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Slå-om-model	Sort	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Slå-om-model	Sort	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Slå-om-model	Sort	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Slå-om-model	Sort	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Slå-om-model	Sort	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksion/ Ekstension stop					

Active X™ Long

En knæortose til forskellige typer knæ smerter som f.eks. mild til moderat sideinstabilitet. Ortosen har skinner med justerbart fleksion/ekstensionstop. Materialet i ortosen giver en let kompression og varme. Ortosen findes i både påtrækningsmodel og slå-om-model. Cirkulerende bånd med D-ring (to øverst og to nederst) som kan løsnes. Leveres med leddet indstillet på 10° fleksion. Sæt med fleksion/ekstension stop er inkluderet.

Anvendelsesområde: Mindre mediale eller laterale meniskskader. Mild gonartrose, bursit og ledbesvær.

Kontraindikationer: Alvorlige knæskader som ACL/PCL rupturer. Vær opmærksom på hævelser og cirkulationsproblemer.

Øvrigt: Længden på ortosen er 40 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28052	Påtrækningsmodel	Sort	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052	Påtrækningsmodel	Sort	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28053	Slå-om-model	Sort	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28053	Slå-om-model	Sort	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28053	Slå-om-model	Sort	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28053	Slå-om-model	Sort	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28053	Slå-om-model	Sort	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28053	Slå-om-model	Sort	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Fleksion/ Ekstension stop					



Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella



Mål: Knæmål midt-patella
cirkulært

Active X™ Patella

Denne åbne model er lavet for at stabilisere patella primært i M-L plan. Ortosen har en indbygget special-lavet pelotte, som gennem sin konstruktion lægger sig fast på siden af patella, griber fat og holder patella på plads. For ekstra støtte har ortosen en aftagelig halvmånedformet plastskinne. Materialet er det innovativa ventilerende ActiveX-materiale, som er behageligt følsomt.

Anvendelsesområde: PFSS (Patellafemoralt Smerte Syndrom), Patella luxation, Patella subluxation.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28055	Sort	XX-Small	24-29 cm	Bilat.
28055	Sort	X-Small	28-33 cm	Bilat
28055	Sort	Small	32-37 cm	Bilat
28055	Sort	Medium	36-41 cm	Bilat
28055	Sort	Large	40-45 cm	Bilat



Mål: Omkreds knæ

Airtex Patellar Tendon Bånd

Airtex Patellar Tendon Bånd (knæortose) giver støtte og kompression under genoptræning efter akutte skader. Ortosen giver dynamisk støtte til patellasenen og er designet med en anatomisk silikonepude, der aflaster senen. Båndet er lavet med en PVC-kerne, der giver bedre stabilitet i knæet.

Ortosen er en del af den nye AIRTEX-serie fra PRIM, som er designet med en ny hudvenlig limteknologi, der gør det muligt at sammenføje de forskellige tekstildele uden søm. Fraværet af tråd og søm reducerer gnidning på huden og øger komforten for brugeren. Airtex-produkter er lette med 100% aktiv åndbarhed.

Anvendelsesområde: Osgood-Schlatters sygdom, chondromalacia patella, tendinitis i patellasenen. Støtte og beskyttelse til sportsaktiviteter, hvor knæet skal strækkes.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28673	Sort	One Size	25-45 cm	Bilat.



Patellavator

Patellavator knæortose giver ved kompression mod patellasenen lindring af smerter i knæet ved patella tendonitis. Ortosen er fremstillet af et CoolFlex materiale som tillader huden at ånde for komfort ved daglig anvendelse og træning. Den vatterede kerne giver et jævnt fokuseret tryk over patellasenen i forhold til at reducere smerter og ømhed. For en mere effektiv kompression har Patellavator et unikt snøredesign, der øger spændingen fra båndet. Desuden er der interlock-lukning der er designet til at tåle aggressiv anvendelse uden at åbne sig og ikke påvirke det modsatte ben under løb etc. Knæbåndet er også designet, så det hindrer stase omkring benet og undgår at irritere popliteaområdet på bagsiden af knæet.

Anvendelsesområde: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sygdom og Chondromalacia patella.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28674	Sort	Small	28-33 cm	Bilat.
28674	Sort	Medium	33-39 cm	Bilat.
28674	Sort	Large	39-44 cm	Bilat.
28674	Sort	X-Large	> 44 cm	Bilat.



Mål: Omkring knæet under patella.

PatellaCamp

Patella Camp er en knæortose beregnet til at give stabilitet til patella. Ortosen er en slå-om-model og er åben i knæhasen. Pelotten placeres mod den instabile side af patella og de to elastiske bånd strammes til ønsket støtte opnås.

Anvendelsesområde: Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Kontraindikationer: Kraftige ødem når kompression kan påvirke cirkulationen.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28679	Marineblå	Medium	<40 cm	Bilat.
28679	Marineblå	Large	>40 cm	Bilat.



Mål: Knæmål midt-patella



Mål: Knæmål midt-patella

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Slå-om-model med kraftig pelotte til stabilisering af patella. Patellastøtten kan applikeres lateralt eller medialt. Pelotten justeres let med de to små bånd. Ortosen har integrerede bånd og er åben i knæhasen. Fremstillet i åndbart materiale.

Anvendelsesområde: Chondromalacia patella, efter lukseret patella og sublukseret patella.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28677	Sort	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28677	Sort	Small	30-35 cm	Bilat.
28677	Sort	Medium	35-40 cm	Bilat.
28677	Sort	Large	40-45 cm	Bilat.
28677	Sort	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28677	Sort	XX-Large	50-55 cm	Bilat.

Gripper™ hinged knee

Slå-om-model med patellaåbning og åbning i knæhasen. Modellen har integreret bånd, der går helt rundt samt metalskiner i forstærkede lommer. Enkel at tage på og af. Ortosen er fremstillet af åndbart materiale. For at hindre ortosen i at glide ned er den forsynet med et antiglidmateriale på indersiden.

Anvendelsesområde: Mild knæledsinstabilitet.



Mål: Knæmål midt-patella

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28128	Sort	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28128	Sort	Small	30-35 cm	Bilat.
28128	Sort	Medium	35-40 cm	Bilat.
28128	Sort	Large	40-45 cm	Bilat.
28128	Sort	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28128	Sort	XX-Large	50-55 cm	Bilat.
28128	Sort	XXX-Large	>55 cm	Bilat.

KNEE immobilizer

Immobiliseringsortose af polyesterelour med indbyggede skinner til stabilisering. Ortosen er opbygget i paneler for enkelt at give mulighed for at justere omfanget. Velcrolukning gennem D-ringe. Enkel at justere til korrekt størrelse. Åbning til patella. Findes i voksen og børne størrelser

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling, muskel- og ledbandskader, efter gipsing og ved simpel standtræning.



Mål1: Knæmål 15 cm over midt-patella

Mål 2: Knæmål midt-patella

Art. nr.	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Længde	Ve/Hø
28655	Børn	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilat.
28655	Voksen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilat.

Ascender® post-op knæortose

Ascender® er en teleskopisk (44-70cm) postoperativ knæortose med mulig indstilling mellem - 10° (hyperekstension) og 70°. Flexions begrænsning kan indstilles mellem -10° og 120°. Indstillingen justeres enkelt ved at løfte og fjerne stropperne i leddet. Leddet kan også låses i fem forskellige positioner; -10° (hyperekstension), 0° (neutral), 10° , 20° , 30° flexion. Leddet kan yderligt sikres ved at sætte en "Anti-tamper låsning" over selve stoppet. Det skal derefter klippes af med saks for at kunne åbne indstillingen.

Hver skinne kan justeres til ønsket individuel længde. På hver skinne findes et låg, som kan åbnes. Skinnen har tydelige markeringer for at sikre, at der er samme længde på den laterale og den mediale skinne.

Den bløde og behagelige polstring har anti-glid materiale på indersiden. Båndet låses med ekstra låsetap, så det holdes under afprøvningen. Ortosen lukkes med kraftige spænder, som fæstes. Båndets længde kan let justeres ved at løsne Y-tappen og klippe båndet til den ønskede længde. Polstringen og båndet kan vaskes i hånden med mild sæbe. Universalmodel som passer både til venstre og højre ben. One Size.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde	Ve/Hø
47540	Ascender post-op knæortose	One Size	44 - 70 cm	Bilat.
47541	Komplet polstring og bånd sæt	One Size		Bilat.
47542	Ekstra polstringssæt	One Size		Bilat.
47543	Ekstra bånd sæt	One Size		Bilat.



ROM postoperativknæortose

Postoperativ knæortose i universelstørrelse med polstring som kan klippes uden at trevle. Skinner af aluminium der kan formes til den bedste pasform. Den behagelige og luftige polstring holdes på plads af de cirkulære bånd. Det indkapslede polycentriske led er let at justere med pinde som er fastgjort til leddet med et lille plastbånd for at forhindre at pindene falder væk. Leddet låses fast med en skrue for at forhindre det i at ændre sig. Leddet kan indstilles i ønsket grad af flexion (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) og ekstension (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen fås i en kort og en lang version.

Anvendelsesområde: Postoperativ behandling og posttraumatisk behandling for immobilisering af knæleddet til kontrol af flexion/ekstension.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Længde
28308	Knæortose, kort	Mørkeblå	Onesize	40 cm
28309	Knæortose, lang	Mørkeblå	Onesize	60 cm
28311	Ekstra Bånd sæt 28308 kort	Mørkeblå	Onesize	
28312	Ekstra Bånd sæt 28309 lang	Mørkeblå	Onesize	
28313	Ekstra Polstring 28308 kort	Mørkeblå	Onesize	
28314	Ekstra Polstring 28309 lang	Mørkeblå	Onesize	





Mål 1: Knæmål 15 cm under midt-patella.

Mål 2: Knæmål midt-patella.

Mål 3: Knæmål 15 cm over midt-patella.

Catalyst Propel™ OA

Denne fire-punkts-knæ ortose er beregnet til behandling af let til svær slidgigt i knæet i kombination med knæ instabilitet eller efter skade for at reducere belastningen i leddet. Ortosen har den unikke Active Thigh Cuff™ (ATC) løsning på forsiden af låret. Dette er en fleksibel og stærk dobbelt lårmanchet der muliggør den ultimative affjedring. Giver beskyttelse og komfort ved at bevæge sig med musklerne gennem hele bevægelsen. Stærk, lavprofil aluminiumsramme af højeste kvalitet giver god beskyttelse.

Q-leddet justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutralposition, med knæet bøjet i 90°, og drej 1/8 del ad gangen for at justere aflastningen. Ortosen leveres med et kort på forskellige stop ved fleksion og ekstension. Catalyst Propel™ OA kan også indstilles til at begrænse bevægelseomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret.

Anvendelsesområde: Let til svær enkelsidig slidgigt i knæet i kombination med knæ instabilitet. Efter skade for at reducere belastningen af leddet.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	Medium	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Ve/Hø
55001	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Small				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Medium				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	X-Large				Ve/Hø
55009	Ekstra Polstring	XX-Large				Ve/Hø
55010	Ekstra Bånd sæt	Small				
55010	Ekstra Bånd sæt	Medium				
55010	Ekstra Bånd sæt	Large				
55010	Ekstra Bånd sæt	X-Large				
55010	Ekstra Bånd sæt	XX-Large				
55011	PCL Bånd	35 cm				
55011	PCL Bånd	43 cm				
55011	PCL Bånd	50 cm				

Glyde OA®

Glyde OA® er en enkel og effektiv unilateral knæortose til behandling af mild til moderat unilateral knæartrose. Et bånd med en enkel trykknaplukning sidder over læggen og giver trækraft og trykafastning. Det åndbare DiamoCool™-stof giver behagelig kompression og skjuler ortosens trepunktsramme.

Anvendelsesområde: Unilateral medial eller lateral mild til moderat knæartrose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2
55024	Medial	Small	Ve/Hø	36-43 cm	29-34 cm
55024	Medial	Medium	Ve/Hø	43-51 cm	34-39 cm
55024	Medial	Large	Ve/Hø	51-61 cm	39-46 cm
55024	Medial	X-Large	Ve/Hø	61-71 cm	46-52 cm
55024	Medial	XX-Large	Ve/Hø	71-81 cm	52-60 cm
55025	Lateral	Small	Ve/Hø	36-43 cm	29-34 cm
55025	Lateral	Medium	Ve/Hø	43-51 cm	34-39 cm
55025	Lateral	Large	Ve/Hø	51-61 cm	39-46 cm
55025	Lateral	X-Large	Ve/Hø	61-71 cm	46-52 cm
55025	Lateral	XX-Large	Ve/Hø	71-81 cm	52-60 cm
55026	Inner wrap	X-Large			
55026	Inner wrap	XX-Large			



Mål 1: Omkredsmål 15 cm over midten af patella.

Mål 2: Omkredsmål 15 cm under midten af patella.

TRUalign™ OA

TRUalign OA™ er en unilateral knæortose til behandling af mild til moderat enkelsidet knæartrose. Det er et enkeltsidet OActive™-led, designet til en brugervenlig "wrap around"-ortose. Let at tage på og af for anvenderen. Ortosen er lavet af et luftigt og behageligt materiale.

Q-joint-teknologien giver anvenderen god aflastning i henhold til 3-punkts princippet for at reducere tryk og smerter ved knæartrose.

Fordele

- Brugervenlige trykknapper
- Dynamiske stropper - fleksible korrektionsmuligheder
- Skum med åbne celler - forbedret åndbarhed
- Lateral ramme - effektiv korrektion af medial eller lateral OA
- Anatomisk formet - stof med høj strækbarhed til godt pasform og kompression

Art.nr.	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2
55018	Small / Medium	Ve/Hø	36-47cm	28-36cm
55018	Medium / Large	Ve/Hø	47-65cm	36-48cm
55018	Large / X-large	Ve/Hø	65-81cm	48-64cm



Mål 1: Omkredsmål 15 cm over midten af patella.

Mål 2: Omkredsmål 15 cm under midten af patella.



OACTIVE®2

Unilateral knæ ortose til behandling af slidgigt i knæet. Smidig og enkel konstruktion med lav vægt. Fremstillet i aluminium. Ortosen har smarte innovative spænder for at gøre det lettere at tage ortosen af og på.

Det unikke Q-leddet justeres med eller mod uret for at opnå den ønskede aflastning. Start med ortosen i neutralposition, med knæet bøjet i 90°, og drej 1/8 del ad gangen for at justere aflastningen. OACTIVE®2 kan også indstilles til at begrænse bevægelsesomfanget i ekstension og fleksion uafhængigt af hinanden. Ortosen kan også indstilles til fri bevægelighed. Leveres med 5° stop installeret. Ortosen leveres med et kort på forskellige stop ved fleksion og ekstension. OACTIVE®2 findes i én størrelse, venstre eller højre.

Anvendelsesområde: Let til svær slidgigt i knæet. Medialt eller lateralt.

Kontraindikationer: Se brugerinstruktion.

Øvrigt: OACTIVE®2 har en maksimal vægtgrænse på 135 kg.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
55000	OACTIVE 2	One Size	Ve/Hø
55012	Ekstra Bånd sæt (uden spænde)	One Size	Ve/Hø
55013	Ekstra Polstring	One Size	Ve/Hø
55014	Suspension Wrap	61cm	
55014	Suspension Wrap	81 cm	

CHECK™ stainless steel

Bekvem knæortose fremstillet af rustfri stål. Beregnet til at modvirke hyperekstension og samt støtte ved instabilitet i knæleddet. Ortosens længde bevirker, at trykket mod femur og tibia bliver mindre og ortosen bliver mere behagelig. Den smidige konstruktion gør, at ortosen kan bæres under tøjet. Polstringen er fremstillet af kunstlæder. D-ringene, der medfølger, kan sættes på den side, der passer patienten bedst. Ortosen har kondylpuder.

Anvendelsesområde: Check Stainless formål er at modvirke hyperekstension i knæleddet og at støtte knæinstabilitet. Indikationer for at bruge Check Stainless er: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, neurologiske skader/sygdomme som medføre svaghed i M Quadriceps.

Kontraindikationer: Ikke beregnet til idrætsudøvelse.

Art. nr.	Model	Mål	Længde	Ve/Hø
28651	Ekstra båndset			
28652	CHECK™ stainless steel	9-13 cm	45 cm	Bilat.
28653	Ekstra D-ringe 4 stk.			



Mål: Knæbredde M-L midt patella





Knæmål 1: Mål M-L midt-patella

Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella

Knæmål 3: Mål M-L 20 cm over patella.

ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperekstension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinnen og Combo-delen let kan sammenkobles. Combo kan/skal ikke bruges sammen med YpsilonFLOW eller ToeOFF FLOW.

Anvendelsesområde: Knæledsinstabilitet, hyperekstension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Patientvægt max 150 kg. Patientens højde max. 2 m.

Kontraindikationer: Totalt bortfald af ligament i knæet. Totalt Quadricepsbortfald. Patientlængde over 2 meter. Patientvægt over 150 kg. Kraftigt reduceret kognitive evner. OBS: Når afprøvning er udført må der ikke være mere end 10° hyperekstension tilbage i ortosen.

Øvrigt: For at bestille en COMBO kræves der 5 varer ud over ToeOFF/ BlueROCKER.

1. Kneledd med skinner (par)
2. Tibiakobling
3. Bånd, tekstil og spænder
4. Lårdel
5. Lårdel SoftKIT (2 stk)

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Knæmål 1	Knæmål 2	Knæmål 3
28780	Knæled m. skinner	One Size				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø		58-70 cm	17-21 cm
28782	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28796	Lægbånd	One Size				
28783	Softkit (2 stk)	Small				
28783	Softkit (2 stk)	Medium				
28783	Softkit (2 stk)	Large				
28783	Softkit (2 stk)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				

Hinged Swedish knee

En gennemprøvet model i en ny udgave. Rammen er fremstillet af aluminium med lav vægt, hvor leddet er integreret for at tillade knæet at bøje. Ny moderne polstring, der gør det let at komme ind og ud af ortosen. Store justeringsmuligheder i omkreds. Sandsynligvis en af de mest gennemprøvede løsninger ved hyperekstension i knæleddet. En universal størrelse, som passer både venstre og højre ben. Nu i en diskret grå farve.

Anvendelsesområde: Hyperekstension i knæleddet.

Art. nr.	Model	Mål	Ve/Hø
28667	Hinged Swedish Knee	28-54 cm	Bilateral
28671	Hinged Swedish Knee Strap Set	One size	Bilateral
28672	Hinged Swedish Knee Liner Set	One size	Bilateral



Mål: Knæmål 10 cm over midtpatella